

4.5 mm selvgjengende corticalisskruer til CHS



Gjengediameter: 4.5 mm
Kjerner diameter: 3.2 mm

Siden kjerner diameteren er større enn på de ikke-selvgjengende corticalisskruene, som tidligere har vært brukt på Haukeland, må det brukes 3.5 mm bor.



Bor: 3.5 mm

Hurtigkoblingen som passer til kombinasjonsreameren passer også til 3.5 mm bor og 3,2 mm guide pinne.

Måling av skrue:

Den lengden som måles med dybdemålet skal brukes, altså det behøves ikke å legge til 2 mm.

Med vennlig hilsen
SMITH & NEPHEW A/S

Lars Rødeseike