

Forklaring på knapper på manøverpanelet på C-buen

Top Left: Radiation warning symbol, C-bue av (off), System på (on).

Top Right: Dempe 5min timer (5 min timer), Lasersikte (laser sight), ASP Auto, Valg av spalteblender (blade selection).

Left Side:

- Lagre bilde manuelt (save image manually)
- Referanse bilde (reference image)
- Beskytte bilde (protect image)
- Speilvend horisontalt (mirror horizontal)
- Speilvend vertikalt (mirror vertical)
- Rotere bilde (rotate image)
- Lys/Kontrast (light/contrast)
- Auto Lys/Kontrast (auto light/contrast)

Center Display:

55	1.10	3.30	0.00	0:00
kV	mA		uGy	min
Undersøk. type				
Pacemaker				
Review				
Autom.	27cm	+ 15	Repon.	
kV	FD-størr.		Modus	

Right Side:

- Programvalg (program selection)
- Bilde minne (image memory)
- Rotera spalteblender (rotate blade)
- Reducere/åpne spalteblender (reduce/open blade)
- Reducere/åpne irisblender (reduce/open iris)

Bottom:

- Forrige program (previous program)
- kV+
- kV-
- Neste program (next program)
- Eksponering Auto/manuell (exposure auto/manual)
- Bildefelt (image field)
- Puls hastighet (pulse speed)
- Puls modus (pulse mode)

Forklaring på knapper på monitorvognen

