

Quick Guide



acumed®

Clavicle Plating System
Acu-Sinch® Repair System

Denne oversettelsen er ikke et offisielt Acumed dokument.

Original operasjonsbrosjyre på Dual-Trak Clavicle Screw kan rekvireres fra:

Swemac Orthopaedics AS


Postboks 330

2001 Lillestrøm

Tlf: 67 10 59 00

info@swemac.com

Swemac

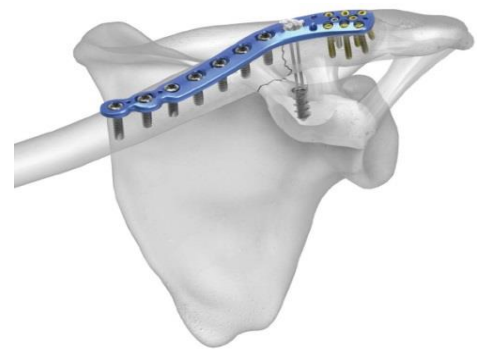

1. Plasser pasienten i beach-leie og skap tilgang til eventuell fraktur og Korakoidens base på beste mulig vis.



2. Bor i sentrum av basis på Koracoiden med Acu-Sinch Drill.




3. Skru i ankeret som er formontert på Acu-Sinch Driver. Frigjør suturene og plasser de anteriort.




4. Velg passende plate fra Acumed Clavicle Plating System.




5. Plasser platen og skru den fast på vanlig måte. La ett ovalt skru hull være fritt superiort om Korakoiden.

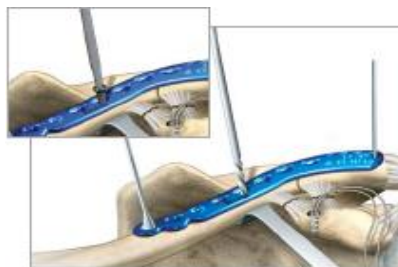


6. Bor bikortikalt gjennom det lovale hullet. Bruk 2.8 mm bor.

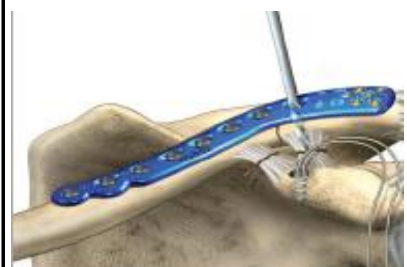

7. Før Acu-Sinch suturene superiort gjennom clavícula og platen.

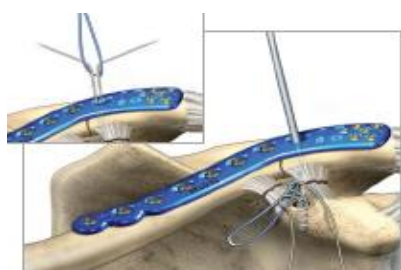

8. Før Acu-Sinch suturene gjennom hullene i Acu-Sinch skiven. Før ned skiven, slik at den passer i det ovale hullet.

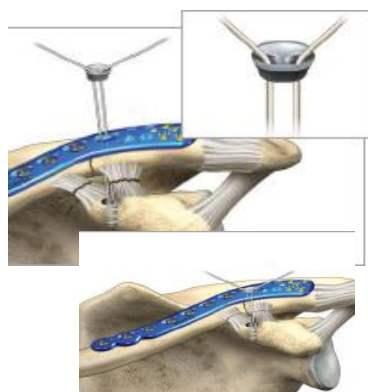

9. Strekk Acu-Sinch suturene for avveid avlastning av det ødelagt ligamentet og lås med passende knute. Reparer evt. ødelagte ligament og kontroller under gjennomlysning.

