

Quick Guide

Locking Clavicle - distale plater

Swemac

Denne oversettelse er ikke et offisielt Acumed dokument.

Original operasjonsbrosjyre på Locking Clavicle Plating System System kan rekvireres fra:

Swemac Orthopaedics AS

Postboks

2001 Lillestrøm

Tlf. 67 10 59 00

www.swemac.com

info@swemac.com


Velg en plate, som er best tilpasset benets anatomi og frakturtype, slik at den understøtter reponeringen.

Denne quick guide viser operasjonsteknikk med bruk av 2,3mm skruer distalt. For låsing med 3,5mm skruer distalt, følg samme prosedyre som insetting av skruer i skaft (bilde 4).




1.

Pasienten leires i beach chair posisjon. Kirurgen velger sin operasjonsmetode.

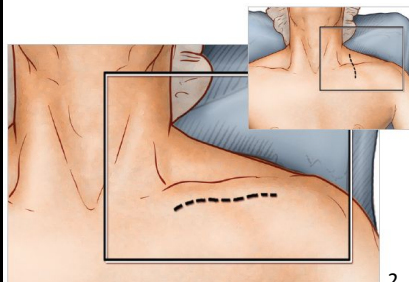

2.

Når platen er ideelt plassert fikseres den midlertidig til benet. Plasser evt. en K-tråd i det mest laterale K-tråds hull, for å sikre at de mest distale skruer ikke plasseres i AC-leddet. De ikke låste skruer kan settes unikortikalt eller bikortikalt. Vær oppmerksom på å ikke overpenetriere bakerste korteks og årsake skade på de nevrovaskulære strukturene.



3.

For optimal stabilitet plasseres de to første ikke låste skruer medially og lateralt for frakturlinjen. Bruk offset borguiden med kompresjonsenden (gul). Bor med 2,8mm bor og sett i 3,5mm kortikal skruer med skruetrekkerhåndtak og skruetrekkerblad. Når de to skruene er plassert, kan krabbekjørne fjernes.



4.

For å stabilisere den distale del plasseres en 2,3mm nonlocking kortikalskrue (sølv) i det mest mediale hullet. Bor med 2,0mm bor og les av lengden på skruen. Sett i skruen med skruetrekkerhåndtak og skruetrekkerblad 1,5mm hex.

Targeting guiden, Grønn = høyre/ Blå = venstre, plasseres på platen (glides ned over K-tråden). Targeting guiden skal flykte med platen.



5.

Sett borguiden i det ønskede skruehull og skru guiden fast i platen. Bor med 2,0mm bor og mål lengden på skruen ved å lese av lasermarkeringen på boret. Hvis det måles mellom to lengder velges den korteste skruen. Fjern guiden og skru 2,3mm låseskrue i med skruetrekkerhåndtak og skruetrekkerblad 1,5mm hex. Fortsett samme prosedyre til de andre skruene er festet. Minimum seks skruer bør brukes.



6.

I skaftet brukes 3,5mm låseskruer med tilhørende borguide. Bor med 2,8mm bor og sett i skruene 3,5mm.



7.

Kontrollér ved hjelp av gjennomlysning. Hvis kirurgen finner benkvaliteten av det laterale fragment dårlig, er det mulighet for å suturere fra medial til lateral rundt coracoiden gjennom suturhullene i den distale del av platen.



8.

